

AIR Kontaktlinsen OPTIX™

⚠️ DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG ENTHÄLT WICHTIGE INFORMATIONEN. BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN UND ZUM NACHLESEN AUFBEWAHREN. KONTAKTLINSEN SOLLTEN IMMER VON EINEM KONTAKTLINSEN-SPEZIALISTEN ANGEPASST WERDEN.



MATERIAL UND VERPACKUNG

AirOPTIX **STERILE** weiche Kontaktlinsen enthalten 67% Lotrafilcon B und 33% Wasser und sind in phosphatgepuffertes Kochsalzlösung gelagert. Die Kontaktlinsen sind bläulich eingefärbt, um die Handhabung zu erleichtern; die Farbe enthält Cu-Phthalocyanin.

ANWENDUNGSGEBIETE

AirOPTIX sind zur optischen Sehkorrektur zum Tragen während des Tages oder für flexibles/verlängertes Tragen (bis zu 6 Nächte, auch während des Schlafens) für Personen mit gesunden Augen geeignet, wenn dies ihr Kontaktlinsenspezialist befürwortet.

EMPFOHLENE TRAGEZEIT UND AUSTAUSCHINTERVALLE

AirOPTIX Kontaktlinsen müssen jeden Monat entsorgt und durch ein neues Paar ersetzt werden.

HANDHABUNG IHRER LINSEN

- Siehe Abbildungen 1 - 5
- Verwenden Sie die Linse nicht, wenn die Verpackung geöffnet oder beschädigt ist.
- Ihr Kontaktlinsenspezialist wird Ihnen genaue Anleitungen zum Aufsetzen und Abnehmen der Kontaktlinsen geben.
- Schütteln Sie die Blisterverpackung vorsichtig, bevor Sie sie öffnen. Ziehen Sie den Foliendeckel ab. Lassen Sie die Linse in Ihre Handfläche gleiten oder, wenn nötig, schieben Sie die Linse mit Ihrem Zeigefinger vorsichtig aus dem Behälter.
- Verwenden Sie niemals Pinzetten, Linsen-Sauger, scharfe Gegenstände oder Ihre Fingernägel, um Ihre Linsen aus dem Behälter oder vom Auge zu nehmen.
- Setzen Sie die Linse nicht auf, wenn sie beschädigt ist.

DIE PFLEGE IHRER KONTAKTLINSEN

- DIE RICHTIGE PFLEGE IHRER KONTAKTLINSEN IST SEHR WICHTIG.
- Ihr Kontaktlinsenspezialist sollte das Pflegesystem auswählen, das für Sie am besten geeignet ist.
- Bitte beachten Sie unbedingt die Gebrauchsanweisungen Ihrer Kontaktlinsenpflegeprodukte.
- Verwenden Sie für Ihre **AirOPTIX** Kontaktlinsen in keinem Fall Hitzedesinfektion oder Pflegesysteme für harte und formstabile gasdurchlässige Kontaktlinsen.
- Bringen Sie NIEMALS Ihre Kontaktlinsen mit unsterilem Wasser (einschließlich Leitungswasser) in Kontakt, da dadurch eine mikrobielle Verunreinigung entstehen kann, welche zu dauerhaften Schädigungen der Augen führen könnte.
- Spülen Sie Ihren Linsenbehälter täglich mit steriler Kochsalzlösung oder frischem Kontaktlinsen-Pflegemittel aus und lassen Sie ihn an der Luft trocknen. Dies hilft, Verunreinigungen und schwerwiegende Augenschäden zu vermeiden.

WICHTIGE HINWEISE

Untersuchen Sie Ihre Augen täglich, wenn Sie Kontaktlinsen tragen. Ihre Augen sollten klar sein, nicht gereizt sein und Sie sollten gut sehen können. Wenn dies nicht der Fall ist, nehmen Sie bitte sofort Ihre Linsen vom Auge und setzen Sie sich mit Ihrem Kontaktlinsenspezialisten in Verbindung. Wenn ungewöhnliche Symptome ignoriert werden, können diese zu ernsthaften Komplikationen führen.

GEGENANZEIGEN

Während der Einnahme einiger Medikamente, einschließlich Augenmedikamenten, oder bei trockenen Augen (unzureichender Tränenfilm) sollten keine Kontaktlinsen getragen werden. Wenden Sie sich bitte im Zweifelsfall immer an Ihren Augenarzt oder Kontaktlinsenspezialisten.

WAS SOLLTEN SIE TUN, WENN EIN PROBLEM AUFTRIT

- ENTFERNEN SIE BITTE SOFORT IHRE LINSE(N).
- Gelegentliches Trockenheitsgefühl der Augen kann durch die Verwendung von Benetzungslösungen gelindert werden. Wenn die Augentrockenheit anhält, wenden Sie sich bitte an Ihren Kontaktlinsenspezialisten.
- Wenn eine Linse festsetzt (sich nicht mehr bewegt), träufeln Sie mehrere Tropfen einer Benetzungslösung ein. Warten Sie, bis sich die Linse wieder frei auf dem Auge bewegt, bevor Sie versuchen, Sie abzunehmen. Wenn die Linse weiterhin festsetzt, suchen Sie bitte SOFORT Ihren Kontaktlinsenspezialisten auf.

ZUSATZINFORMATIONEN

- Das Risiko einer mikrobiellen Hornhautentzündung hat sich unter Trägern, die Linsen als Dauertragelinsen verwenden, als größer herausgestellt, als bei jenen, die Linsen nur tagsüber tragen.
- Rauchen erhöht das Risiko einer mikrobiellen Hornhautentzündung für Kontaktlinsenträger.

BITTE BEACHTEN:

- Kontaktlinsenträger sollten Ihren Kontaktlinsenspezialisten regelmäßig aufsuchen.
- Seifen, Lotions, Cremes, Kosmetika oder Deodorants können Reizungen verursachen, wenn Sie mit Ihren Linsen in Kontakt kommen. Verwenden Sie sie daher vorsichtig.
- Setzen Sie Ihre Linsen auf, bevor Sie Make-up auftragen, und nehmen Sie sie vor dem Abschminken wieder ab.
- Vermeiden Sie es, Aerosole, wie z.B. Haarspray, in die Nähe Ihrer Augen zu sprühen, während Sie Ihre Linsen tragen, da dies Reizungen verursachen kann.
- Befragen Sie Ihren Kontaktlinsenspezialisten hinsichtlich des Tragens von Kontaktlinsen beim Schwimmen, da es nicht prinzipiell empfohlen ist.
- Nehmen Sie Ihre Kontaktlinsen ab, wenn Sie schädlichen oder reizenden Dämpfen ausgesetzt sind.
- Informieren Sie Ihren Arbeitgeber darüber, dass Sie Kontaktlinsen tragen, besonders dann, wenn Ihr Beruf die Verwendung von Augenschutzbrillen oder ähnlicher Schutzmittel erfordert.
- Tragen Sie Ihre Kontaktlinsen nicht, während Sie schlafen, es sei denn, Ihr Kontaktlinsenspezialist hat dem Über-Nacht-Tragen ausdrücklich zugestimmt.

Hersteller:
CIBA Vision Corporation
Duluth, Georgia 30097, USA



EU-Bevollmächtigter:
CIBA Vision GmbH
D-63868 Großwallstadt/Germany

Vertrieb:
CIBA Vision Vertriebs GmbH
D-63702 Aschaffenburg
Germany

Lieferung der Linsen je nach
Verfügbarkeit.
Ausgabedatum: 07/05

BC	Basiskurve
PWR	Stärke